




IFU EE  
Pesusvammid  
/lapid


Pehme  
Efektiivne  
Hügieeniline

Kehale ja  
juustele

8 pcs

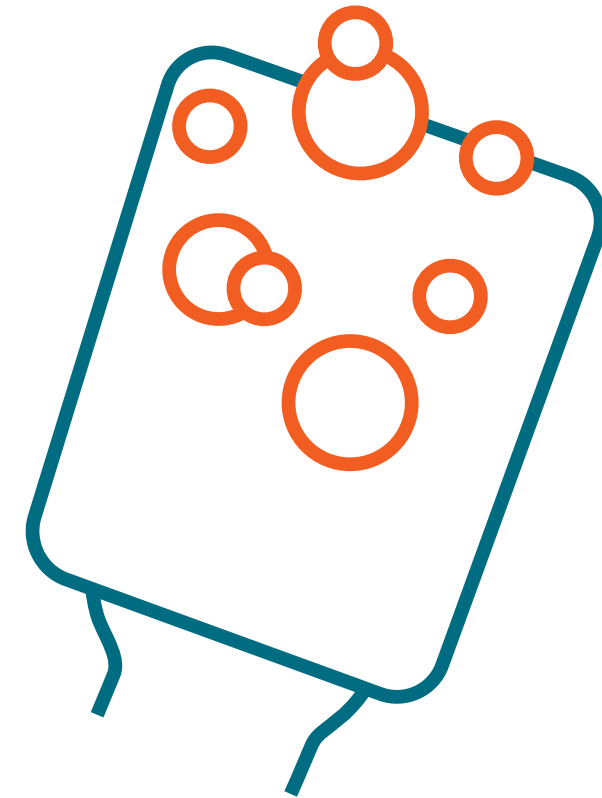

↑  
Lisage vett kuni täitejooneni

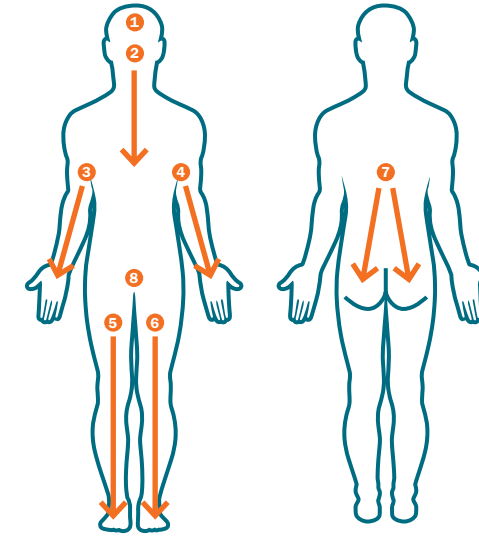

1. Juuksed
2. Nägu, kael, rindkere ja kõht
3. Käsi ja kaenlaalune
4. Käsi ja kaenlaalune
5. Jalg ja jalalaba
6. Jalg ja jalalaba
7. Selg ja tuharad
8. Intiimpiirkond

**Kasutamiseks:**

Kogu keha pesemiseks. Alakeha puhastamiseks.  
Inkontinentsete ja kateteriseeritud patsientide pesemiseks.

Sobib igas vanuses, lastest geriaatriani. Lõhnatu.

Tasakaalustatud pH-ga, ei ärrita nahka, ei mõjuta tundlikkust,  
hüpoallergiline, CHG-ga ühilduv, säilitusainete ja  
parabeenivaba.



↑  
Lisage vett kuni täitejooneni

**Kasutusjuhend**



1

Tõmmake ülemine  
osa lahti ja lisage vett  
kuni täitejooneni.



2

Pigistage või rullige  
kotti, et vesi jaotuks  
pesulappidele.



3

Kasutage iga  
kehapiirkonna jaoks  
ühte pesulappi, vahu  
saamiseks pigistage  
lappi.

palmedic  
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands  
| info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

Maaletooja | Aaskla OÜ | Kanali tee 4-402 | 10112, | Tallinn | info@aaskla.ee

REF 808  
Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol  
Material Specifications Polyurethane  
Size 18 cm x 18 cm  
ART.36.01