

↑  
Tirare per aprire

  
**puracloth**™  
by palmedic


IFU IT

**Il panno  
usa e getta  
che rilascia  
schiuma**


**Morbido  
Resistente  
Igienico**

**Per corpo e  
capelli**

**8 pezzi**

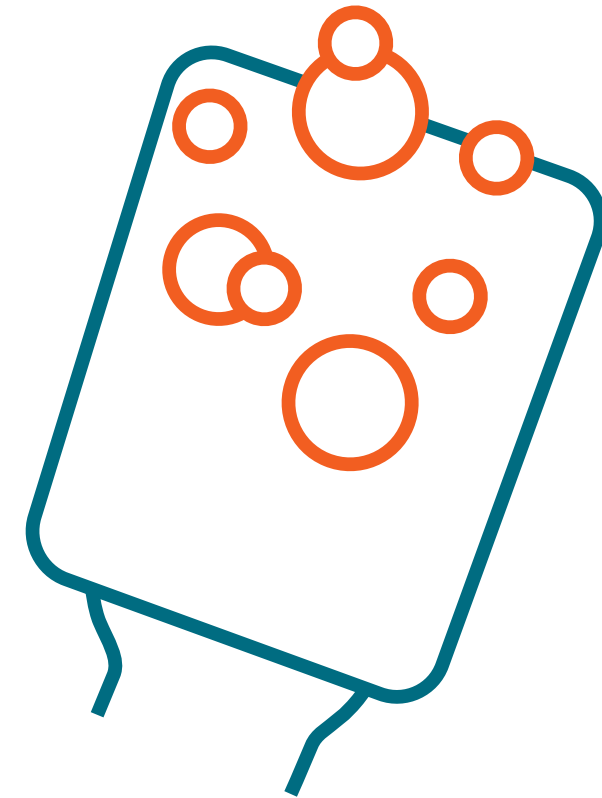

↑  
Aggiungere acqua fino alla linea di riempimento

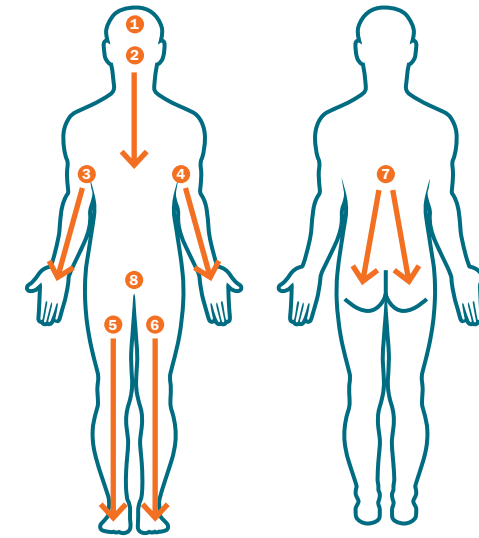

1. Capelli
2. Viso, collo, torace e addome
3. Braccio e ascelle
4. Braccio e ascelle
5. Gamba e piede
6. Gamba e piede
7. Schiena e glutei
8. Perineo

**Destinazione d'uso:**

Per detersione completa del corpo, shampoo, pulizia perineale.

Pulizia in caso di incontinenza e pulizia del meato.  
Adatto dai bambini ai pazienti geriatrici. Inodore,  
pH bilanciato, non irritante, non sensibilizzante,  
ipoallergenico, compatibile con CHG, privo di conservanti e  
parabeni.



↑  
Aggiungere acqua fino alla linea di riempimento

**Mode d'emploi**



1

Aprire il tappo superiore e aggiungere acqua fino alla linea di riempimento



2

Spremere o arrotolare il sacchetto per distribuire l'acqua nei panni



3

Usare un panno per ogni area del corpo, strizzarlo per ottenere la schiuma desiderata.

**palmedic**  
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |  
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

**Ingredients (INCI)** Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

**Material Specifications** Polyurethane

**Size** 18 cm x 18 cm

ART.36.01