

↑
Tarik untuk buka




IFU MY
Kain cucian
pakai buang
berbuih sendiri


Lembut
Kuat
Bersih

Untuk badan dan rambut

8 pcs

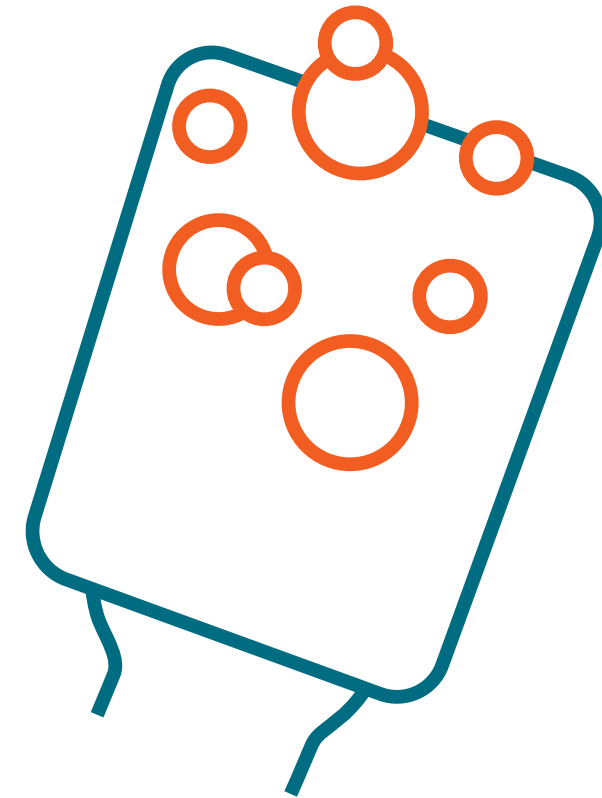

↑
tambahkan air sehingga ke garisan penuh

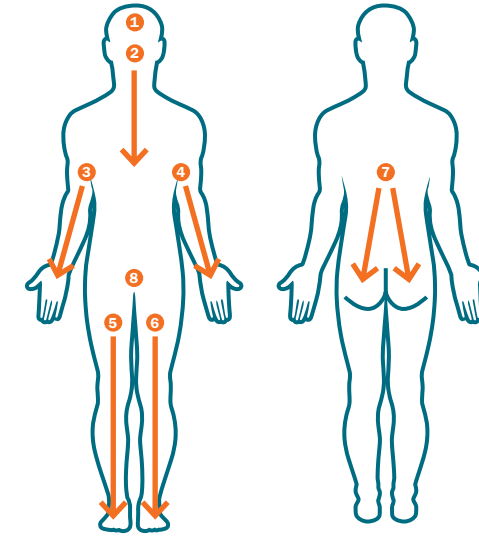

1. Rambut
2. Muka, leher, dada dan abdomen
3. Lengan dan bawah lengan
4. Lengan dan bawah lengan
5. Kaki dan tapak kaki
6. Kaki dan tapak kaki
7. Belakang dan punggung
8. Perineum

Kegunaan:

Untuk mandian keseluruhan badan, shampoo kepala, pembersihan perineum, pembersihan najis dan pembersihan daging.

Sesuai digunakan oleh kanak-kanak sehingga wargatua, tiada pewangi.

mempunyai keseimbangan pH, tidak merengsa, tidak mensensitif, hipoalergenik, serasi CHG, tanpa pengawet dan tanpa paraben.



↑
tambahkan air sehingga ke garisan penuh

Arahan penggunaan



1

Tarik pelekat untuk membuka penutup dan tambahkan air sehingga ke garisan penuh



2

Ramas atau bolak-balikkan beg untuk mengedarkan air ke seluruh kain pengelap



3

Gunakan sehelai kain pengelap untuk setiap bahagian permukaan badan, ramas kain pengelap untuk mendapatkan buih yang diperlukan



Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

Material Specifications Polyurethane

Size 18 cm x 18 cm

ART.36.01