




IFU NL
zelfschuimend
wegwerp
wasdoekje


Zacht
Sterk
Hygiënisch

voor huid en haar

8 stuks

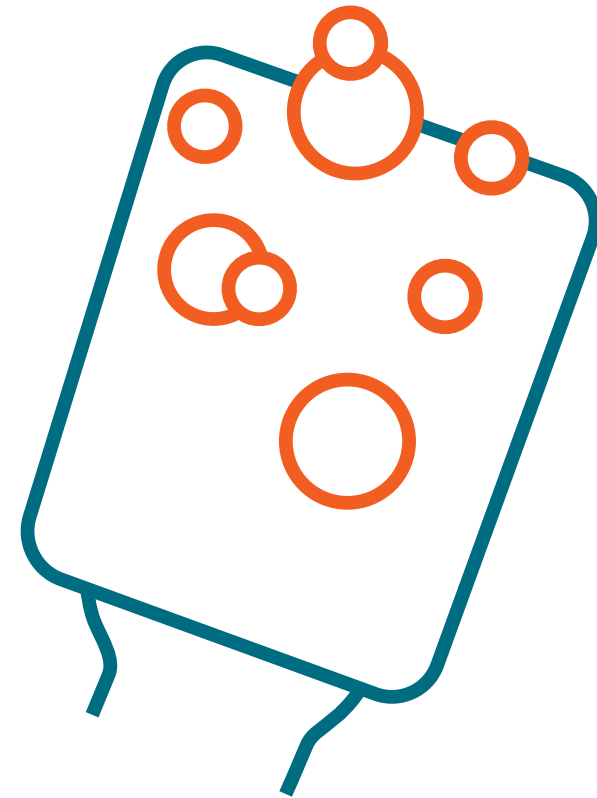

↑
Vul met water tot aan de stippellijn

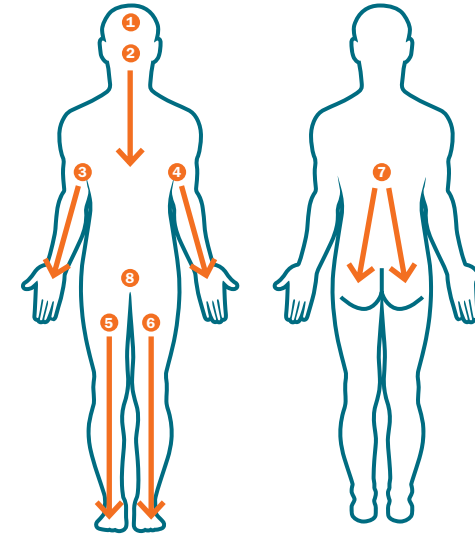

1. Haar
2. Gezicht, nek, borst en buik
3. Arm en oksel
4. Arm en oksel
5. Been en voet
6. Been en voet
7. Rug en billen
8. Perineum

Voor het wassen van het gehele lichaam en de haren o.a. perineale reiniging, incontinentie reiniging en anogenitale verzorging

Geschikt voor zowel kinderen als geriatrische mensen.

Ongeparfumeerd, pH-neutraal, huidvriendelijk en hypoallergeen.
Compatibel met CHG (chloorhexidinegluconaat).
Vrij van conserveringsmiddelen en parabenen.



↑
Vul met water tot aan de stippellijn

Gebruiksaanwijzing



1
Open de verpakking en voeg water toe tot aan de stippellijn



2
Knijp en masseer de verpakking om het water te verdelen onder de wasdoekjes



3
Gebruik 1 wasdoekje voor elk gedeelte van het lichaam. Knijp in het doekje voor de gewenste hoeveelheid schuim



Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808
Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol
Material Specifications Polyurethane
Size 18 cm x 18 cm
ART.36.01