

↑  
Pull to open


  
**puracloth**™  
by palmedic

IFU RUS  
**Губки для  
МЫТЬЯ**


Мягкие  
Эффективные  
Гигиенические

Для тела и волос

8 pcs

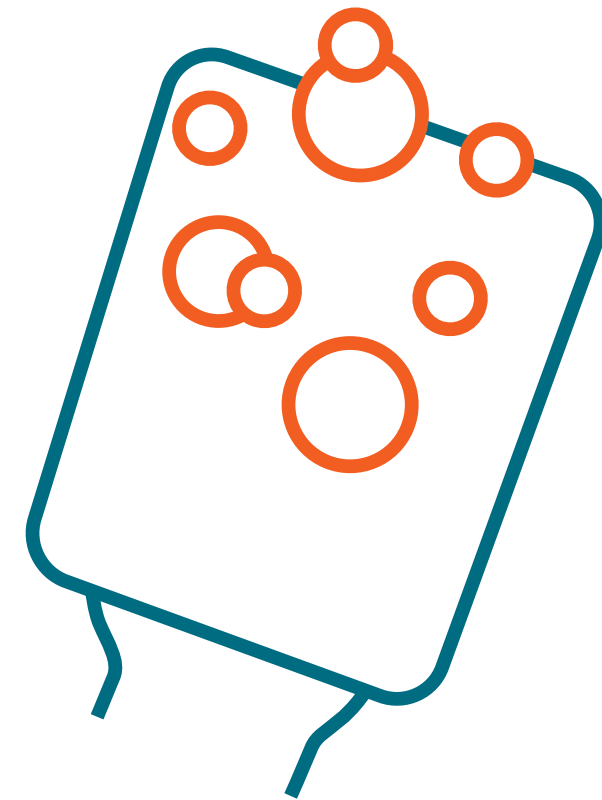

↑  
добавьте воды до линии заполнения

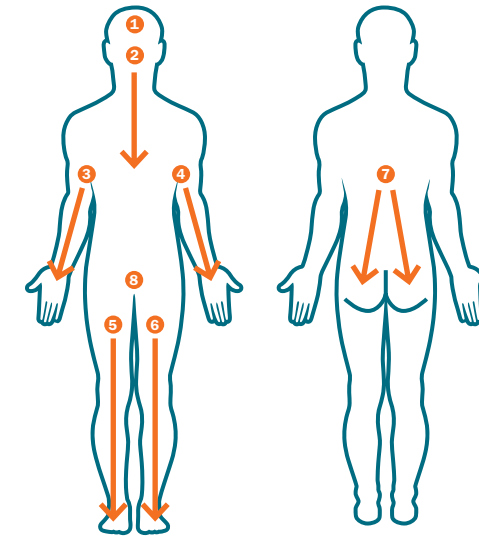

1. Волосы
2. Лицо, шея, грудь и живот
3. Рука и подмышка
4. Рука и подмышка
5. Нога и ступня
6. Нога и ступня
7. Спина и ягодицы
8. Интимная зона

**Использование.**

Для мытья всего тела, а также для мытья волос и интимной зоны.  
Используются при недержании мочи и для мытья людей с катетером.

Подходит также для очищения полости рта.

Подходит для людей любого возраста.

Не содержит запаха. Имеет сбалансированный pH.

Не вызывает раздражения. Гипоаллергенный. Без консервантов и парабенов. Совместим с СНГ.



↑  
добавьте воды до линии заполнения

**Инструкции по использованию**



1

Откройте верхнюю крышку и добавьте воды до линии заполнения



2

Сожмите или скрутите пачку, чтобы вода равномерно распределилась по губкам для мытья.



3

Для каждой части тела используйте новую губку. Чтобы получить пену, сожмите губку, тем самым активируя её.

**palmedic**  
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands  
| info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

Импортер | Askia OÜ | Kanali tee 4-402 | 10112, | Tallinn | info@aaskia.ee

REF 808  
**Ingredients (INCI)** Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol  
**Material Specifications** Polyurethane  
**Size** 18 cm x 18 cm  
ART.36.01