

↑  
Pull to open

  
**puracloth**<sup>TM</sup>  
by palmedic


IFU SI

## Umivalna krpa za enkratno uporabo s samopenečim milom


Mehka  
Močna  
Higienična

Za telo in lase

8 pcs

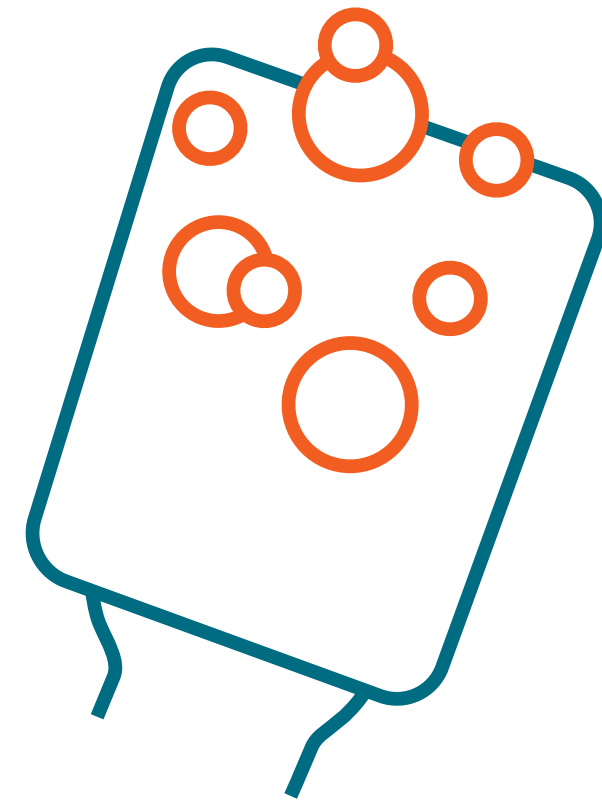

↑  
Dodaj vodo do označene črte

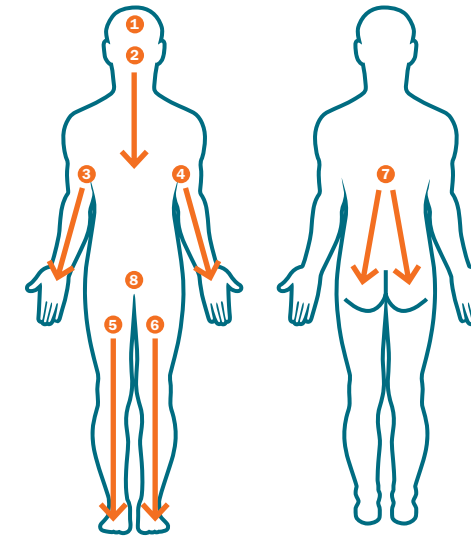

1. Lasje
2. Obraz, vrat, prsi in trebuh
3. Roka in pazduha
4. Roka in pazduha
5. Noga in stopalo
6. Noga in stopalo
7. Hrbet in zadnjica
8. Presredek

### Namen:

Za umivanje celotnega telesa in šamponiranje.  
Za inkontinenčno in anogenitalno nego.

Primerno tako za otroke kot za geriatrične osebe.

Neodšavljene, ph-nevtralne, ne dražijo kože, hipoalergenske,  
združljivo s CHG (klorheksidin glukonat), brez konzervansov in  
parabenov.



↑  
Dodaj vodo do označene črte

### Navodila za uporabo



1

Odpri na vrhu in  
dodaj vodo do  
označene črte



2

Stisni tako, da se  
voda porazdeli po  
vseh umivalnih  
krpicah



3

Uporabi eno krpico za  
vsak del telesa, stiskaj  
krpico za željeno količino  
pene.

**palmedic**  
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |  
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

**Ingredients (INCI)** Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

**Material Specifications** Polyurethane

**Size** 18 cm x 18 cm

ART.36.01