


↑  
Pull to open




IFU DE  
selbst  
schäumende  
Einweg  
Waschtuch

Weich  
Stark  
Hygienisch  
Für Körper und Haare

8 St

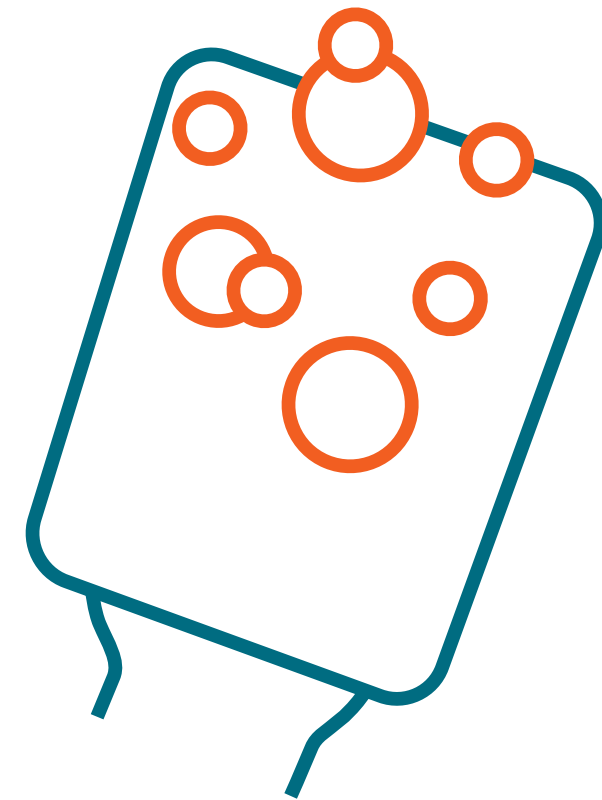

↑  
Wasser bis zur Fülllinie

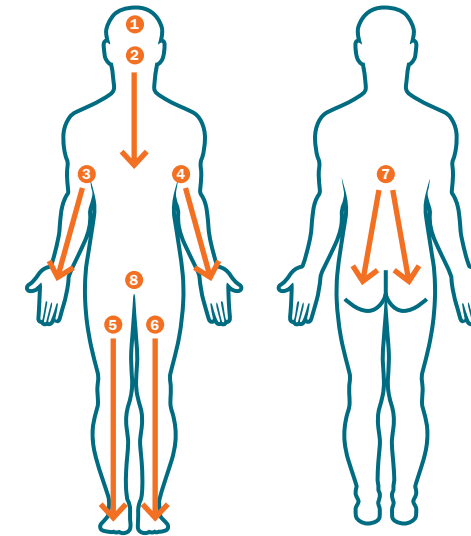

1. Haar
2. Gesicht, Hals, Brust und Unterleib
3. Arm und Achselhöhle
4. Arm und Achselhöhle
5. Bein und Fuß
6. Bein und Fuß
7. Rücken und Gesäß
8. Perineum

**Zweck:** Zur Ganzkörperwaschung, Shampooieren, Reinigen des Damms. Inkontinenzreinigung und Reinigung der Geschlechtsorgane.

Geeignet für Kinder und ältere Menschen.

Unparfümiert, pH-neutral, nicht reizend, hypoallergen, CHG-kompatibel, frei von Konservierungsmitteln und frei von Parabenen



↑  
Wasser bis zur Fülllinie

Gebrauchsanweisung



1

Ziehen Sie die obere Versiegelung auf und füllen Sie Wasser bis zur Fülllinie ein.



2

Drücken Sie mehrfach zusammen oder rollen Sie den Beutel, um das Wasser in dem Tuch zu verteilen.



3

Verwenden Sie einen Waschlappen für jede Körperpartie, drücken Sie den Lappen aus, um den gewünschten Schaum zu erzeugen.



Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |  
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

**Ingredients (INCI)** Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

**Material Specifications** Polyurethane

**Size** 18 cm x 18 cm

ART.36.01