

↑
Tirar para abrir

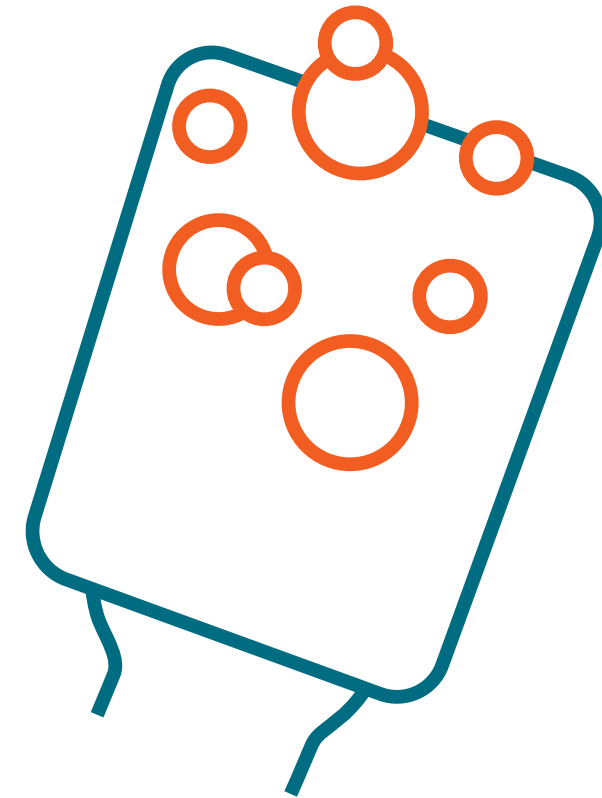

puraclothTM
by palmedic

IFU ES
**Toallita de
limpieza
desechable
que genera su
propia espuma**


Suave
Eficaz
Higiénico

Para cuerpo y cabello

8 unidades



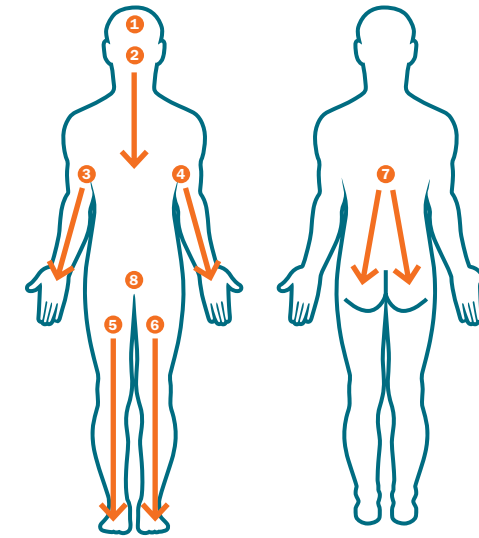↑
Agregar agua hasta la línea de llenado.



1. Cabello
2. Cara, cuello, Tórax y abdomen
3. Brazo y axila
4. Brazo y axila
5. Pierna y pie
6. Pierna y pie
7. Espalda y nalgas
8. Perineo

Uso previsto:

Para el aseo de cuerpo completo, incluyendo el cuero cabelludo, substitute pelo for cabello y región perineal.

Limpieza en casos de incontinencia y para la zona perineal.

Apto para personas de cualquier edad. Sin perfume, pH equilibrado, no irritante, no sensibilizante, hipoalergénico, compatible con CHG, libre de conservantes y parabenos.



↑
Agregar agua hasta la línea de llenado.

Instrucciones de uso



1

Abrir el cierre superior y agregar agua hasta la línea de llenado.



2

Apretar o enrollar la bolsa para distribuir el agua en las toallitas.



3

Usar una toallita para cada área del cuerpo, apretando la toallita para obtener la espuma deseada.

palmedic
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

Material Specifications Polyurethane

Size 18 cm x 18 cm

ART.36.01