


↑
Pull to open


puraclothTM
by palmedic


IFU TR
kendiliğinden
köpüren tek
kullanımlık
yıkama
pedidir

Yumuşak
Güçlü
Hijyenik
Vücut ve saç için

8 pcs

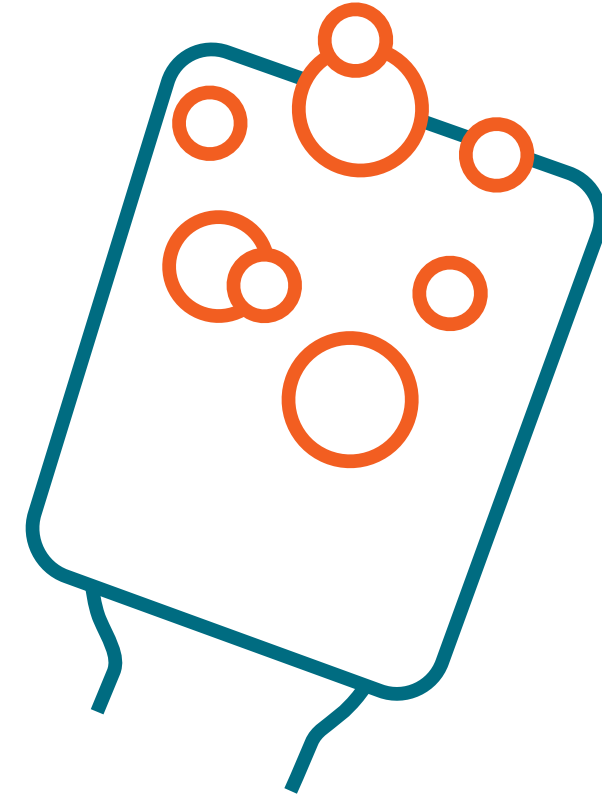

↑
doldurma çizgisine kadar su ekleyin

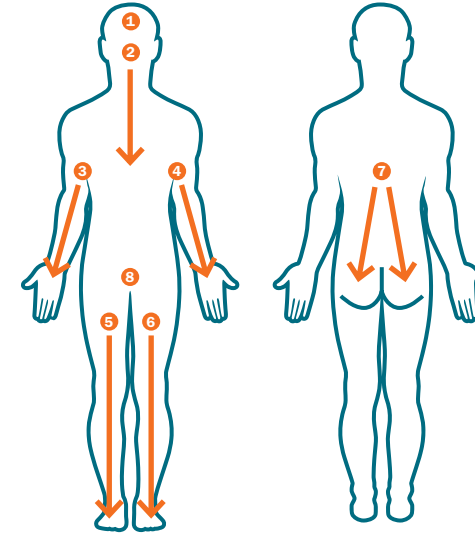

1. Saç
2. Yüz, boyun, göğüs ve karın
3. Kol ve koltuk altı
4. Kol ve koltuk altı
5. Bacak ve ayak
6. Bacak ve ayak
7. Sırt ve kalçalar
8. Perine

Amaç:

Tüm vücut banyosu, şampuanlı perine temizliği
İnkontinans temizliği ve meatal temizlik.


Çocuktan yaşlıya uygun. Kokusuz,

pH dengeli, tahriş etmeyen, hassaslaşmaya neden olmayan,
hipoalerjenik, CHG uyumludur, koruyucu ve paraben içermez.



↑
doldurma çizgisine kadar su ekleyin.

Kullanım için talimatlar

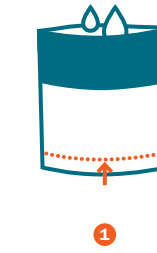

1
Üst contayı çekerek
açın ve doldurma
çizgisine kadar su
ekleyin



2
Suyu yıkama bezlerine
dağıtmak için torbayı
sıkın veya yuvarlayın



3
Vücudun her bölgesi
için ayrı bir bez
kullanın, bezi sıkarak
hastaya uygulayın

palmedic
tailor-made solutions

Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |
info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808

Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol

Material Specifications Polyurethane

Size 18 cm x 18 cm

ART.36.01