




IFU GR
**Αυτοσαπουνιζ
 όμενο
 απορρίψιμο
 πανάκι
 καθαρισμού**


**μαλακό
 ισχυρό
 υγιεινό**

**Για το δέρμα και τα
 μαλλιά**

8 τεμάχια

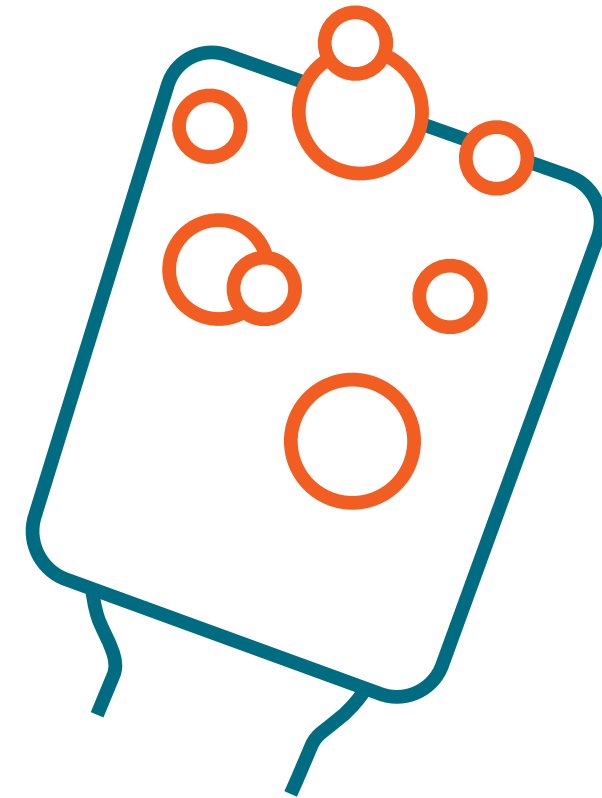

↑
 Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή πλήρωσης.

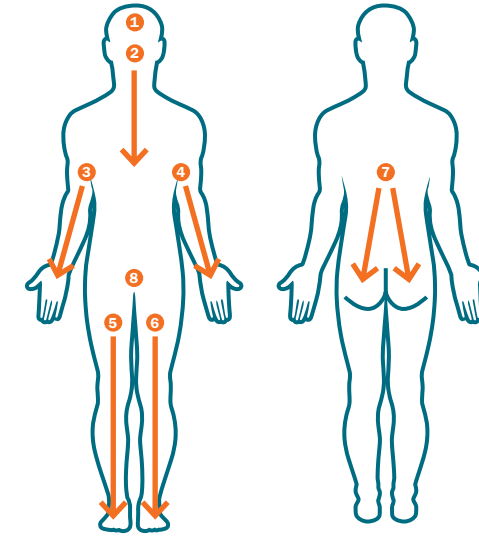

1. Μαλλιά
2. Πρόσωπο, λαιμός, στήθος και κοιλιά
3. Χέρι και μασχάλη
4. Χέρι και μασχάλη
5. Πόδι και πόδι
6. Πόδι και πόδι
7. Πλάτη και γλουτοί
8. Περινέο

Για πλήρες λούσιμο σώματος, σαπονάρισμα, καθαρισμός περινέου.
 Καθαρισμός ακράτειας και καθαρισμός ουρηθρικού στόμιου.

Κατάλληλο για νεογνά έως γεροντικά άτομα. Χωρίς άρωμα,
 με ισχυρό pH, μη ερεθιστικό, μη ευαισθητοποιητικό, υποαλλεργικό,
 συμβατό με CHG, χωρίς συντηρητικά και
 παράβολα.




↑
 Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή πλήρωσης.

Gebruiksaanwijzing



1

Ανοίξτε την επάνω
 σφράγιση και
 προσθέστε νερό
 μέχρι την γραμμή
 πλήρωσης.

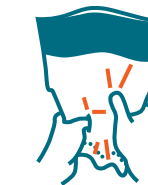

2

Σφίξτε ή τυλίξτε τη
 σακούλα για να
 διανεμίσετε το νερό
 στις πετσέτες
 καθαρισμού.



3

Χρησιμοποιήστε μία
 πετσέτα για κάθε
 περιοχή του σώματος
 και στύψτε την
 πετσέτα για να
 αποκτήσετε την
 επιθυμητή ποσότητα
 σαπουνάδας.



Palmedic B.V. | Koningslinde 12 | 7131 MP | Lichtenvoorde | The Netherlands |
 info@palmedic.eu | www.palmedic.eu | © 2023 Palmedic |

REF 808
Ingredients (INCI) Sodium cocoyl Isethionate, Panthenol
Material Specifications Polyurethane
Size 18 cm x 18 cm
 ART.36.01